


DENTABS

Die Pille für den
Gipsabscheider

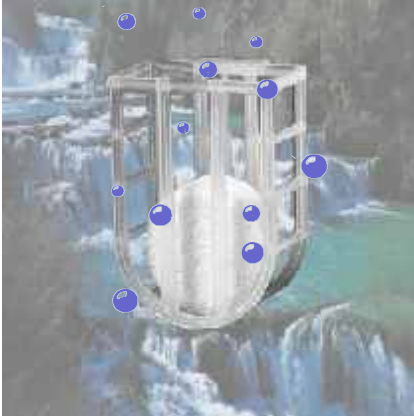

verhindert den Verschluss von Abwasserrohren
vermindert Fäulnisgeruch
erleichtert die Reinigung des Abscheiders



DENTABS - bindet Gipse, Quarze und
phosphatgebundene Einbettmassen

Selbst durch regelmäßige Reinigung von Gipsabscheidern können Ablagerungen im Abflussrohr nicht vermieden werden. Zwischen 15 und 40% der beim Trimmen anfallenden Gipse setzen sich in herkömmlichen Gipsfanganlagen nicht ab und führen über kurz oder lang zu Rohrverschlüssen. Extrem wird die Situation bei Sammelrohren, wenn dann im ganzen Haus nichts mehr geht.

Eine Tablette pro Woche genügt, und nur noch klares Wasser fließt ab.

Mit DENTABS Rohrverschlüssen vorbeugen

Wenn ein Abflussrohr verstopft, ist Not am Mann. Und die Kosten summieren sich. Stillstand im ganzen Labor, verzögerte Auslieferung, verärgerte Kunden oder gar Kundenverlust verbunden mit Überschwemmung, üblem Geruch und ungeplanten Kosten machen eine Rohrreinigung alles andere als angenehm und kostengünstig.



Und so wirkt DENTABS

DENTABS einfach nach der Entleerung mit dem mitgelieferten Dosierkörbchen im Gipsabscheider einhängen (bei Mehrkammerabscheidern vorzugsweise am Überlauf zur zweiten Kammer) so, dass die Pille vollständig unter der Wasseroberfläche liegt und dem gipsbelasteten Wasserzufluß nicht direkt ausgesetzt ist. Schon bald setzt DENTABS seine Wirkstoffe frei. Auch feinste Gips-Schwebstoffe werden ausgeflockt und sinken zu Boden. Nur noch klares Wasser fließt ab.

DENTABS sind nicht kennzeichnungspflichtig, in der Handhabung neutral und unschädlich. Die Wirkstoffe von DENTABS erfüllen selbstverständlich die gültigen Abwasserverwaltungsvorschriften.

Abscheiderreinigung kinderleicht

Sie werden es erleben: so leicht war die Entleerung noch nie. Mit DENTABS beugen Sie der Plattenbildung vor. Und wo nichts verhärtet, gibt's auch nichts zu spachteln.

DENTABS ist umweltfreundlich

Wußten Sie, dass Sie maximal 400 mg Gips pro Liter Wasser in die Kanalisation einleiten dürfen, weil Gips Beton angreift? Mit DENTABS sind es nur noch wenige Milligramm.

Hygienisch und Geruchsfrei

Wer eine Nase für Probleme hat, wird seine Freude haben, weil sauberes Wasser nicht riecht und Schwebstoffe gebunden sind. Doch Disziplin muß sein: Getränkereste und Seifenlauge gehören nicht in Ihren Abscheider!



Durch Flockung werden auch feinste Gips-Schwebstoffe gebunden und sinken zu Boden. Nur noch klares Wasser fließt ab.

Sie wollen die Flockung selber beobachten?

Füllen Sie dazu ein Glasgefäß mit dem Gips-Wasser-Gemisch aus dem Trimmer und geben ein winziges Bruchstück einer DENTABS-Tablette dazu. Schütteln Sie das Gemisch kräftig auf.

Wie oft Sie DENTABS brauchen?

Ganz einfach: Eine Pille reicht für das Gips-Fassungsvolumen eines Standardabscheiders von ca. 15 Litern. Am besten regelmäßig einmal die Woche entleeren, einmal die Woche eine DENTABS. Sie sparen Zeit, Sie sparen Geld, Sie tun was für Ihre Mitarbeiter und die Umwelt. Für sich selbst und für Ihr Portemonnaie.

DENTABS online bestellen: www.dentabs.de/shop

www.DENTABS.de